




STEPBYSTEP

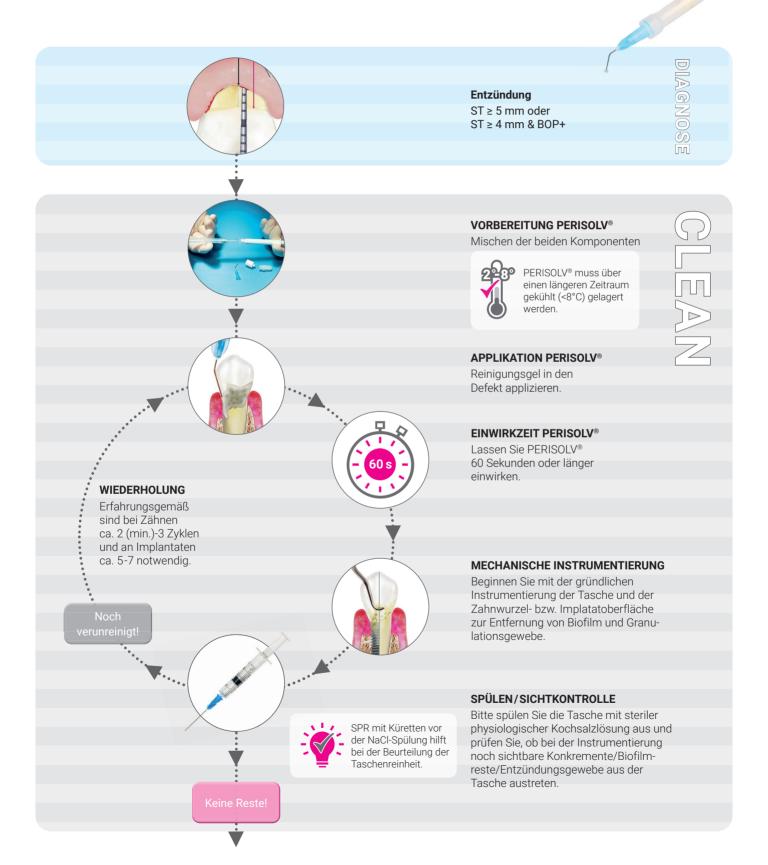

 \mathbb{R}

CLEAN





VORBEREITUNG xHyA (vernetzte Hyaluronsäure)

Sie benötigen eine Karpulenspritze (stumpfe Applikationskanüle G21-G27).



VERSIEGELUNG

Füllen Sie die Tasche von apikal nach koronal mit xHyA-Gel auf.



PATIENTENANWEISUNG PARODONTITIS

- 2 Stunden nicht essen & trinken
- 24 Stunden keine Spülung mit CHX-haltigen Präparaten
- Erst am Abend des Behandlungstages mit dem Zähneputzen beginnen

NACHSORGE












PATIENTENANWEISUNG PERIIMLPANTITIS

- · 2 Stunden nicht essen & trinken
- 24 Stunden keine Spülung mit CHX-haltigen Präparaten
- 24h keine Zahnreinigung
- · mindestens 2 Tage keine Interdentalbürsten benutzen

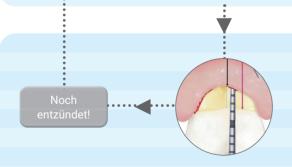

KONTROLLTERMINE

- · Nachkontrollen führen Sie nach eigenem Ermessen durch
- Planen Sie Besuche im Abstand von 3-12 Monaten ein
- Klinische Parameter prüfen (ab dem 3-Monatskontrolltermin)

STEPBYSTEP-VIDEO **PARODONTITIS**







STEPBYSTEP-VIDEO **PERIIMPLANTITIS**