

EVIDENZ

KLINISCHE EVIDENZ

Chirurgische Behandlung multipler gingivaler Rezessionen in der ästhetischen Zone mit BGT und hyaDENT mit der Tunneltechnik



Prä-OP

Patient mit 2 ausgeprägten gingivalen Rezessionen Miller-Klasse II in der ästhetischen Zone (Regio 12 und 13).



OP

Mobilisierung der Gingiva an der Empfängerstelle ohne Inzision. Das BGT wurde in der geeigneten Größe eingebracht, die Oberfläche des Transplantats mit hyaDENT konditioniert.



Submuköse Positionierung des BGT unter Anwendung der Tunneltechnik. Stabilisierung des Transplantats durch entsprechende Nahttechnik. hyaDENT wurde vor der Nahtstabilisierung unterhalb der Mukosa aufgebracht, um eine beschleunigte post-operative Wundheilung zu erzielen.



7 Tage post-OP

Situation vor Nahtentfernung: Beschleunigte Wundheilung ohne Anzeichen einer Irritation oder Infektion.



3 Monate post-OP

Ausgezeichnete Wiederherstellung des Weichgewebes: vollständige Rezessionsdeckung und ausreichendes Volumen an keratinisierter Gingiva, sowohl hinsichtlich der Höhe, als auch der Breite. Für den Patienten konnte ein äußerst ansprechendes ästhetisches Ergebnis erzielt werden.

Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Stefan Fickl, Deutschland